

پیوست ۱: شرایط حفظ و نگهداری دستگاه

در این بخش به ذکر نکاتی جهت حفظ و نگهداری اجزای مختلف دستگاه شامل مانیتور، بازوی رباتیک، کابل‌ها و ... و همین‌طور تعمیرات دوره‌های موردنیاز پرداخته می‌شود تا عمر بهینه دستگاه افزایش همچنین، تعمیرات احتمالی ناشی از عدم حفظ و نگهداری دستگاه کاهش پیدا کند.

فضای موردنیاز

حداقل فضای موردنیاز برای استفاده و کار با دستگاه در جدول زیر ارائه شده است. در حین استفاده از دستگاه، کف اتاق مسطح و حداقل دو ترمز تالی را فشار دهید.

طول	۱ متر
عرض	۲ متر
ارتفاع	۱.۵ متر

شرایط کاری دستگاه

دما: ۱۰ تا ۳۸ درجه سانتی‌گراد

رطوبت هوا: ۵٪ تا ۷۰٪

هشدارهای راه‌اندازی دستگاه

پیش از استفاده از دستگاه، تمامی دستورالعمل‌ها و توضیحات مربوط به نصب را مطالعه کنید.

به منظور سلامتی خود و بیماران جهت هرگونه برق‌گرفتگی یا خسارات مالی و آسیب جانی اطلاعات مندرج در دفترچه راهنما را به دقت مطالعه فرمایید.

۱. پیش از نصب از لحاظ سالم بودن بدنه، ظاهر و کابل‌های متصل به دستگاه را بررسی نمایید و در صورت داشتن ایراد

نصب نکنید.

۲. به دکمه‌ها ضربه نزنید، حتی‌الامکان لوله‌های سیلیکونی را از دستگاه جدا نکنید و کابل EMG را مخدوش ننمایید.

۳. دستگاه را در فضای باز و مرطوب قرار ندهید.

۴. هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا تعویض هیچ قسمت از دستگاه نکنید.

۵. هرگز فلش آلوده به دستگاه متصل ننمایید.

۶. در زمان استفاده، از دستگاه‌های استیمولاتور استفاده نکنید.

۷. زمان اتمام کار با دستگاه، سیستم را خاموش نمایید.
۸. جهت ثبت اطلاعات بیمار در دیتابیس از نام یا شماره یکتا به منظور شناسایی هر بیمار استفاده نمایید.
۹. قبل از استفاده از دستگاه از نحوه کالیبراسیون صحیح و محل قرارگیری الکترودهای چسبی اطمینان یابید.
۱۰. هنگام درآوردن دوشاخه از پریز سیم را نکشید در غیر این صورت سیم برق آسیب خواهد دید.
۱۱. در صورت خراب بودن دستگاه، بخشی از آن یا داشتن شکستگی هرگز اقدام به راه اندازی آن نکنید.
۱۲. در زمان اتصال کابل های EMG به آرامی مهره کابل را بچرخانید.
۱۳. قبل از استفاده از پروب های پرشر کف لگنی در اندام بیمار از سالم بودن آن اطمینان حاصل کرده و خارج از اندام بیمار فشار را تنظیم نمایید.
۱۴. در زمان اتمام شارژ ایرماوس از درگاه موجود بروی پنل دستگاه استفاده شود
۱۵. برای شارژر ایرموس از کابل شارژ داخل پک دستگاه استفاده نمایید.

تمیز کردن

- جهت تمیز کردن دستگاه و کابل ها از یک دستمال نرم آغشته به ماده الکلی ملایم استفاده نمایید.
- هرگز از مواد شوینده دارای خاصیت اسیدی استفاده نشود.
- از ریزش آب به روی دستگاه خودداری شود.