



شرکت فنی و مهندسی هوشمند پژوه

تجهیزات انتقال خون و آزمایشگاهی پزشکی

Hooshmand Pajooch Technical engineering Co.LTD.

شماره:

تاریخ:

پیوست:

شرایط نصب دستگاه

سالن خونگیری که دستگاه مخلوط کن تمام اتوماتیک کیسه خونگیری مدل FD300PW در آن نصب میگردد باید دارای شرایط زیر باشد :

- دمای سالن : ۲۰ الی ۳۰ درجه سانتی گراد (مجهز به دستگاه های سرمایشی و گرمایشی) .

- وجود پریز برق جداگانه و مجزای سالم و بدون شکستگی برای دستگاه بر روی دیوار آنهم از نوع پریز ارت دار و متصل به سیم ارت مرکزی.

- وجود ولتاژ برق 220 ولت AC ثابت و بدون نویز و نوسان ، متصل به پریز تغذیه دستگاه (ترجیها متصل به استابلایزر ولتاژ و یا دستگاه UPS آنلاین یا آفلاین).

- وجود سطحی کاملا تراز و محکم و بدون از لقی ، شلی و نوسان جهت قرار دادن و نصب دستگاه خونگیر تمام اتوماتیک بر روی آن بطور دائم (عدم وجود این سطح ، مانع نصب و تحویل دستگاه خواهد بود) .