

شرایط محیطی لازم جهت نصب و نگهداری دستگاه بست بالانس

- دستگاه را در یک محیط خشک، خنک، تمیز و روشن نصب کنید و از قرار گرفتن آن در معرض نور خورشید، گرما، سرما، رطوبت، گرد و غبار، شوک، فشار، لرزش یا سایر عوامل آسیب‌زا جلوگیری کنید.
- دستگاه را بر روی یک صفحه صاف و محکم قرار دهید و از تغییر جهت یا شکل صفحه خودداری کنید. صفحه باید به اندازه کافی بزرگ باشد تا بتوانید لود سل‌ها را با فاصله مناسب از هم روی آن قرار دهید.
- دستگاه را با استفاده از کابل USB به یک کامپیوتر یا تبلت مجهز به نرم‌افزار Best Balance متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که کابل USB در حین استفاده از دستگاه قطع نشود و کامپیوتر یا تبلت خاموش نشود.
- دستگاه را به یک منبع برق مطمئن و پایدار متصل کنید. اطمینان حاصل کنید که برق در حین استفاده از دستگاه قطع نشود و دستگاه از سوء برق‌گیری محافظت شود.
- قبل از استفاده از دستگاه، به آموزش کامل و جامع درباره نحوه نصب، راه‌اندازی، کاربری و خاموش کردن دستگاه بپردازید. همچنین به رعایت حداکثر و حداقل وزن قابل تحمل لود سل‌ها، عدم قرارگیری هیچ چیزی روی صفحه قرارگیری لود سل‌ها به جز پاتخت یا صندلی که بیمار روی آن قرار می‌گیرد، عدم تغییر تنظیمات نرم‌افزار Best Balance بدون مجوز فروشنده یا سازنده دستگاه توجه کنید.
- برای نگهداری و تعمیر دستگاه، باید به رعایت موارد زیر توجه کنید:
 - دستگاه را با یک پارچه نرم و خشک تمیز کنید و از استفاده از مواد شوینده، الکل، بنزین یا سایر مواد شیمیایی خودداری کنید.

- دستگاه را به صورت دوره‌ای به یک متخصص تعمیرات برای بررسی و تعویض قطعات سالم و فرسوده بسپارید.
- در صورت بروز هرگونه خطا، عدم کارکرد صحیح یا صدور صداهای نامناسب از دستگاه، فوراً از استفاده از آن خودداری کنید و با فروشنده یا متخصص تعمیرات تماس بگیرید.